

# JY-8038A Gesichtsbedampfer


## Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!  
Für einen einwandfreien und sicheren Gebrauch lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Behandlungsbeginn. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder Kundendienst, bzw. lassen Sie sich von einer Fachperson beraten.

### A. Installation

1. Stellen Sie das kreuzförmige Fußgestell auf einen stabilen Untergrund auf und befestigen Sie das Halterohr an dem Fußgestell von unten mit der Schraube.
2. Befestigen Sie den Hauptteil des Gerätes auf dem Höhenverstellrohr.
3. Setzen Sie den Wasserbehälter ein und fixieren ihn mit der Schraube.

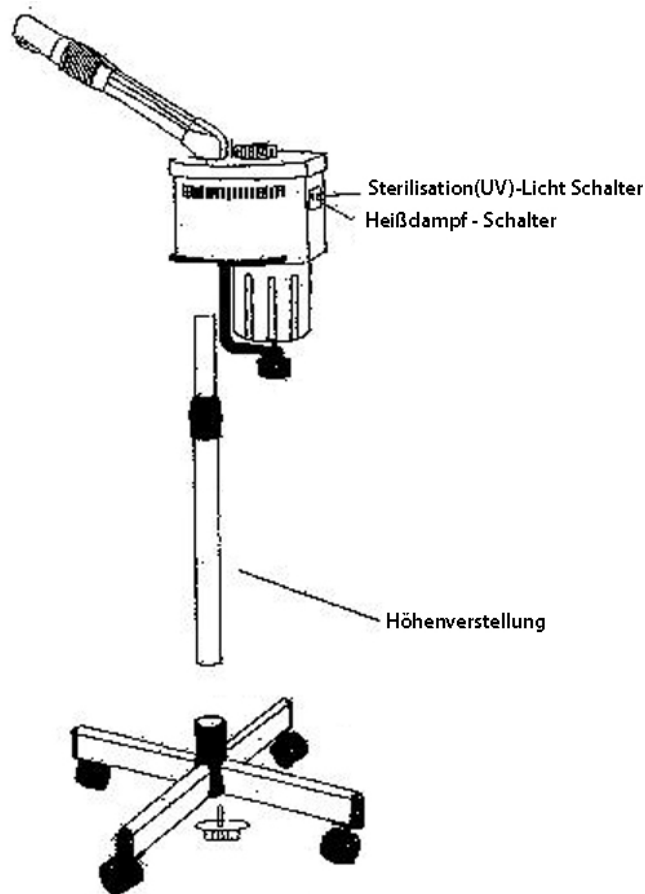

### B. Behandlungsablauf

1. Stellen Sie sicher, dass das Wasserglas gut befestigt ist.
2. Füllen Sie sauberes Wasser in den Behälter ein. Achten Sie bitte darauf, dass die Wasserhöhe die Maximum-Markierung nicht übersteigt!
3. Schalten Sie das Gerät ein, es wird nun ca. 5 Minuten dauern bis der Dampf erzeugt wird.
4. Drücken Sie die OZON-Taste, damit der Ozon-Dampf gesprüht wird.
5. Benutzen Sie die UP & DOWN - Tasten um die Behandlungszeit einzustellen.

### **C. Wichtiger Hinweis**

1. In dem Gerät ist eine erweiterte automatische Schutz-/Warnfunktion eingebaut. Wenn die Wasserhöhe das Maximum übersteigt oder das Wasser schmutzig ist, beginnt das Gerät zu summen und stoppt automatisch den Arbeitsvorgang. Gleichzeitig wird auch der Strom abgeschaltet.

In diesem Fall müssen Sie das Gerät ausschalten und etwas Wasser ausgießen, damit es unterhalb der Maximum-Marke steht, bzw. das schmutzige Wasser ausgießen und ein Sauberes einfüllen.

Dann starten Sie das Gerät bitte neu, es wird nun normal funktionieren.

**Wichtig!** Nach jeder Prozedur muss das Glas geleert und gereinigt werden. Das Wasser muss man jedes Mal frisch einfüllen und auf keinen Fall die Wasserreste zwischen zwei Prozeduren im Glas stehen lassen und dann nachgießen!

**Dieses Produkt besitzt eine CE-Zulassung und entspricht den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinien.**