



Bedienungsanleitung



DM-208 (3 Motoren)

Behandlungs- Therapieliege/ Massageliege

Sie finden hier wichtige Hinweise für die Benutzung der Massageliege DM-208

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH!

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Information

1.a Besondere Merkmale der Massageliege DM-208

2 Bedienung

2.a Nach der Anlieferung

2.b Montage/Aufbau

2.c Was ist vor der Erstbenutzung zu beachten

2.d Einstellungen und Funktionen

2.e Allgemeine Sicherheitshinweise

3 Pflege und Wartung

4 Technische Daten

1 Allgemeine Informationen

Vorwort

Die Behandlungsliege hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen und wurde selbstverständlich auf Funktionalität und elektrische Sicherheit überprüft.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf. Sie enthält wichtige Informationen für Betreiber und Anwender über alle Merkmale, die für eine sichere und komfortable Bedienung dieses Gerätes nötig sind.

1.a Besondere Merkmale der Behandlungsliege DM-208

- elektrische Höhenverstellung
- elektrische Verstellung von Rückenteil
- elektrische Verstellung von Fußbereich (Dachstellung)
- Kopfbereich mit Gesichtsausschnitt
- Komplette waagerechte Einstellung
- langlebige Teile und Materialien
- pflegeleicht

2 Bedienung

2.a Nach der Anlieferung

Die DM-208 Behandlungsliege wurde bei Ihnen komplett aufgebaut in einem Karton angeliefert. Bitte überprüfen Sie die Kartons äußerlich auf erkennbare Schäden und öffnen Sie diese möglichst vorsichtig, damit Sie nicht aus Versehen die Polsterung beschädigen.

- Ein Messer könnte den Inhalt beschädigen.

2.b Montage/Aufbau

- Papierrollenhalter möglich gerade in Haltevorrichtung einschieben und Halteclip anbringen.

2.c Was ist bei Inbetriebnahme zu beachten

- Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von der Liege, achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Polster beschädigen.
- Funktionieren alle Verstell-Funktionen einwandfrei?

  elektrische Höhenverstellung

  elektrische Rückenteilverstellung

  elektrische Fußteilverstellung

2.d Einstellungen und Funktionen

Die Behandlungsliege kann über die 6 Tasten (Abb.1) auf dem Bedienungselement elektrisch gesteuert werden.

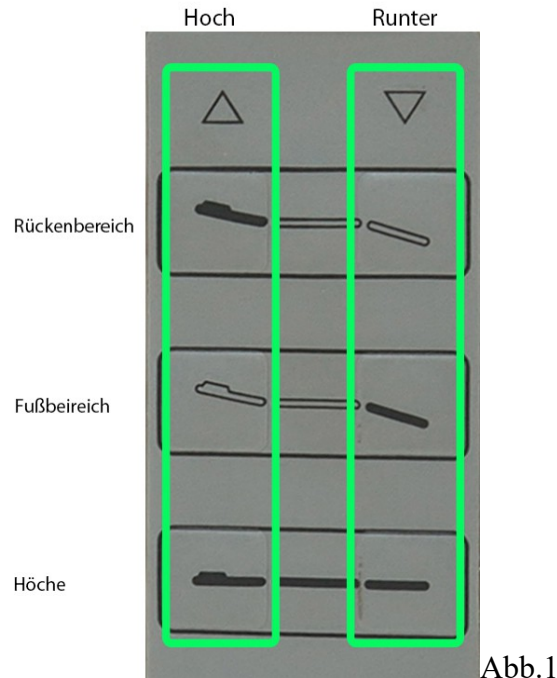


Abb.1

Bei Herunterdrücken der linken Taste (Pfeil nach oben) fährt die Liege nach oben, bei Herunterdrücken der rechten Taste (Pfeil nach unten) fährt die Liege nach unten. Die Liege bewegt sich nur solange Druck auf die Taster ausgeübt wird

Die Kopfstütze kann eingestellt oder gar entfernt werden. Der Stopfen für das Gesichtsausschnitt kann ebenfalls bei Bedarf entfernt oder eingesetzt werden. (Abb2)



Abb.2

2.e Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das maximale Hubvermögen (100kg) darf nicht überschritten werden.
- Falls Flüssigkeit auf oder in das Motorgehäuse gelangt, sofort Netzstecker ziehen! Die Liege muss dann durch eine befugte Person oder Institution kontrolliert werden.
- Bitte das Netzkabel so legen, dass es nicht zwischen beweglichen Teilen der Liege eingeklemmt werden und niemand darüber stolpern kann.
- Behandlungsliege darf nicht in Feuchträumen (z.B.Hydrotherapie) betrieben werden.
- Lassen Sie nicht qualifizierte Personen, insbesondere Kinder, unbeaufsichtigt in der Nähe der Behandlungsliege.
- Sorgen Sie dafür, dass sich während der Behandlung, außer Ihnen und dem Patienten, niemand in der Nähe aufhält, um zu vermeiden, dass sich jemand einklemmt.

3 Pflege und Wartung

- Untergestell

Metallteile mit einem weichen trockenen Tuch reinigen. Bei hartnäckigem Schmutz in PH-neutraler Seifenlauge anfeuchten.

- Liegefläche

Oberer Bezug kann einfach abgezogen werden und im Schongang bei ca. 30°C in eine Waschmaschine gewaschen werden.

(Waschen bei höheren Temperaturen kann das Klettverschluss von dem Bezug beschädigen!).

Zur Aufrechterhaltung des Bedienungskomforts und der guten Funktion empfiehlt es sich, Ihre Liege einmal jährlich durch geschultes Fachpersonal inspizieren und warten zu lassen.

Sie können selbst einige Vorkehrungen treffen, um die Lebensdauer Ihrer Liege zu verlängern. Vor Beginn von Wartungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker ziehen!.

- Netzkabel

Kontrollieren Sie das Netzkabel regelmäßig, bei Beschädigung soll es sofort ersetzt werden.

- Achsen/Gelenke

Bitte mindestens halbjährlich und bei Auftreten ungeschmeidiger Bewegung schmieren; dazu – sehr sparsam – handelsübliches Maschinenschmieröl verwenden.

4 Technische Daten

Abmessungen Behandlungsliege: DM-208

L/B/H - 193 cm / 70 cm / 60 bis 95 cm

Polsterung: 5 cm

Bezugsstärke: 1,3 mm

Gewicht: 125 kg

Belastbarkeit: 180kg

Hersteller: Medeo GmbH
Alexander-Bell-Str. 14 D-53332 Bornheim

Model: DM-208

Serial-No.: 040-208 Jahr: 2015

Leistungsaufnahme: 55 Watt

Netz: 220V/50Hz

Absicherung: 2A

Klasse 1, Typ B

Vor Betrieb Handbuch lesen
Nur für kosmetische Anwendungen



Entsorgung

Entsprechend dem Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz sind Altgeräte, die in Deutschland gekauft wurden, direkt an den Hersteller (Medeo GmbH) zu schicken.

Die Entsorgung durch uns ist kostenlos. Die Geräte dürfen nicht bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben werden

Medeo GmbH
Alexander-Bell-Str. 14
53332 Bornheim