

# **HZ-3818 und HZ-3838**

## **Elektrische Massageliege mit Heizfunktion**



## **Bedienungsanleitung**

### **1. Leistungsmerkmale**

Bei der H3818A handelt es sich um eine hochwertige vollelektrische Massageliege mit elegantem, luxuriösem Design. Das robuste Gestell verleiht der Liege sehr hohe Stabilität.

Durch 4 kraftvolle und leise Elektromotoren lassen sich die Höhe sowie die Neigung der Rückenlehne, des Fußteiles und die Neigung der ganzen Liege vielfältig verstellen.


Die Verstellung und Bedienung der Liege erfolgt mit Hilfe der programmierbaren Fernbedienung.

Mittels drei Speichertasten auf der Fernbedienung können 3 bevorzugte Behandlungspositionen individuell gespeichert und auf nur einen Knopfdruck wiedereingestellt werden.


Die H3818A ist dank dicker Polsterung sehr komfortabel. Der hochwertige 1,3 mm starke Bezug aus Kunstleder ist sehr pflegeleicht.

Absenkbare Armlehnen können mit Hilfe von Gasdämpfer manuell bis zu 25 cm nach unten verstellt werden.

## 2. Abmessungen:

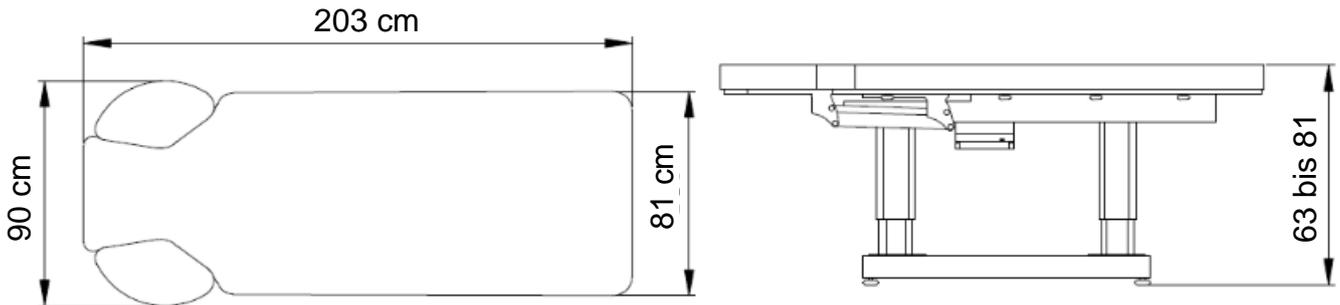

## 3. Fernbedienung

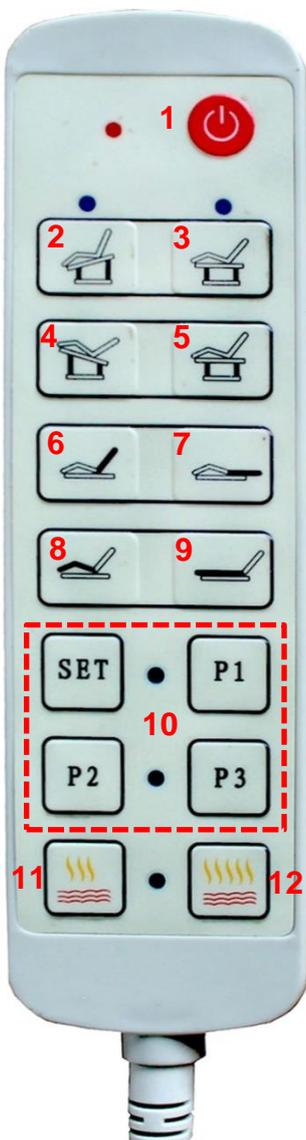

**1:** Ein- / Ausschalten der Liege (Das Stromkabel muss vorher an die Steckdose angeschlossen werden)

**2** und **3:** Mit den Tasten 2 und 3 können Sie die ganze Liege nach links kippen (Kopfteil höher als Fußteil) und wieder flach stellen

**4** und **5:** Mit den Tasten 4 und 5 können Sie die ganze Liege nach rechts kippen (Fußteil höher als Kopfteil) und wieder flach stellen

**6** und **7:** Mit den Tasten 6 und 7 können Sie den Neigungswinkel der Rückenlehne einstellen

**8** und **9:** Mit den Tasten 8 und 9 können Sie die Kniestütze höher und tiefer einstellen

**10:** Programmertasten zum Speichern und Abrufen von Positionen der Massageliege. Mit Tasten P1 bis P3 haben Sie die Möglichkeit drei individuelle Liegepositionen nach Ihren Wünschen zu speichern. Fahren Sie dazu die Massageliege durch Drücken der Einzelfunktionstasten 2 bis 9 in die gewünschte Position. Drücken Sie 3 mal hintereinander, oder 1 mal 3 Sekunden



die Taste SET und dann unmittelbar die gewünschte Programmtaste P1, P2 oder P3. Die gespeicherte Liegeposition wird durch einen kurzen Signalton bestätigt. Nun ist Ihre individuelle Behandlungsposition gespeichert und kann jederzeit durch direktes Drücken von P1, P2 oder P3 abgerufen werden. Die Programmtasten P1 bis P3 können durch Wiederholen des beschriebenen Speichervorgangs jederzeit wieder neu belegt werden.

**11** und **12:** Tasten für die Temperatureinstellung der Heizfunktion

## 4. Verstellung der Armstützen



Drücken Sie den Einstellhebel gemäß der Pfeilrichtung und drücken Sie die Armstütze nach unten, um diese in die Wunschposition zu bringen. Falls Sie nur den Hebel betätigen und die Stütze nicht drücken, rutscht diese in die Ausgangsposition (oberste Stellung).

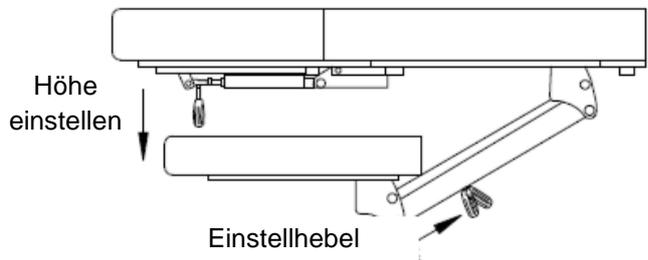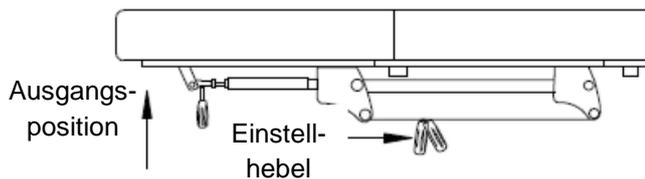

## 5. Optionales Zubehör

### Frotteebezug



### 4 Zusatzrollen



## 6. Technische Daten

<b>Modell-Nr.</b>	HZ-3838, HZ-3818
<b>Länge Gesamt</b>	203 cm
<b>Länge Rückenlehne</b>	80 cm
<b>Länge Sitz/Fußteil</b>	120 cm
<b>Breite</b>	81 cm
<b>Höhe</b>	65 bis 83 cm
<b>Verstellung der Rückenlehne</b>	80°
<b>Armstützen</b>	35 x 17 cm
<b>Belastbarkeit ohne Rollen</b>	200 kg
<b>Belastbarkeit mit Rollen</b>	170 kg
<b>Höhe der Rollen</b>	7 cm
<b>Maße des Gestells</b>	125 x 50 cm
<b>Gewicht</b>	108 kg