



## Fußpflegestuhl DP-8298



**DP-8298**  
(3 Motoren)

Sie finden hier wichtige Hinweise zur Benutzung vom Fußpflegestuhl DP-8298

**BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH!**

## Inhaltsverzeichnis

### 1 Allgemeine Informationen

1.a Besondere Merkmale zum Fußpflegestuhl DP-8298

### 2 Bedienung

- 2.a Nach der Anlieferung
- 2.b Montage/Aufbau
- 2.c Was ist vor der Erstbenutzung zu beachten
- 2.d Einstellungen und Funktionen
- 2.e Allgemeine Sicherheitshinweise

### 3 Pflege und Wartung

### 4 Technische Daten

# 1 Allgemeine Informationen

## Vorwort

Mit dem Erwerb Ihres Fußpflegestuhls DP-8298 haben Sie für sich und Ihre Kunden ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden.

Der Fußpflegestuhl hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen und wurde selbstverständlich auf Funktionalität und elektrische Sicherheit überprüft.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf. Sie enthält wichtige Informationen für Betreiber und Anwender über alle Merkmale, die für eine sichere und komfortable Bedienung dieses Gerätes nötig sind.

## 1.a Besondere Merkmale zum Fußpflegestuhl DP-8298

- elektrische Höhenverstellung
- elektrische Rückentelverstellung
- elektrische Sitzneigungverstellung
- drehbar
- Armlehnen sind schwenkbar
- komplett in die waagrecht verstellbar
- Beinauflagen waagrecht und senkrecht verstellbar , ausziehbar

## 2 Bedienung

### 2.a Nach der Anlieferung

Der Fußpflegestuhl DP-8298 wurde bei Ihnen komplett aufgebaut in einem Karton angeliefert. Bitte überprüfen Sie die Kartons äußerlich auf erkennbare Schäden und öffnen Sie diese möglichst vorsichtig, damit Sie nicht aus Versehen die Polsterung beschädigen.

### 2.b Montage/Aufbau

- Fußpflegestuhl vorsichtig aus dem Karton heben. Ein Messer könnte den Inhalt beschädigen.
- Fußpflegestuhl muss nach dem Aufbau waagrecht ausgerichtet werden. Stellen Sie die Füße des Stuhls durch rein- bzw. herausschrauben so ein, dass ein fester Stand gewährleistet wird.
- Fußpflegestuhl kann über die Tasten auf dem Bedienungselement elektrisch hoch- bzw. herunterfahren werden, weiterhin lassen sich das Rückenteil sowie die Sitzneigung per Handbedienung verstellen.

### 2.c Was ist vor der Erstbenutzung zu beachten

- Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie vom Stuhl, achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Polster beschädigen.
- Bitte alle Schrauben vor Inbetriebnahme prüfen und nachziehen.
- Funktionieren alle Verstell-Funktionen einwandfrei?
  1. elektrische Höhenverstellung
  2. elektrische Rückenverstellung
  3. elektrische Sitzneigungsverstellung

## 2.d Einstellungen und Funktionen

Die Höhenverstellung erfolgt mittels Handbedienung.

Der Fußpflegestuhl kann über die 2 Handtasten auf dem Bedienungselement elektrisch hoch bzw. heruntergefahren werden.

Der Stuhl bewegt sich nur solange Druck auf die Taster ausgeübt wird

Die Verstellung vom Rückenteil und der Sitzneigung erfolgt auch mittels Handbedienung.

Das Kopfteil des Stuhls besitzt über einen Gesichtsausschnitt. Wenn Sie Ihren Kunden auf den Bauch legen lassen, kann der Kunde die Gesichtspartie in dem Gesichtsausschnitt lagern, das sorgt für eine entspannte Körperhaltung.



## 2.e Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Achtung!!!** Nicht auf das Kopfteil oder Fußteil setzen
- Es ist grundsätzlich zu beachten, dass sich Personen nur zweckentsprechend des Fußpflegestuhls auf den Mittelteil (Sitzfläche der Liege) setzen. Fuß- bzw. Rückenlehne sind nur für die Abstützung des Oberkörpers bzw. der Beine ausgelegt.
- Das maximale Hubvermögen (160kg) darf nicht überschritten werden.
- Falls Flüssigkeit auf oder in das Motorgehäuse gelangt, sofort Netzstecker ziehen! Der Stuhl muss dann durch eine befugte Person oder Institution kontrolliert werden.
- Bitte das Netzkabel so legen, dass es nicht zwischen beweglichen Teilen der Liege eingeklemmt werden und niemand darüber stolpern kann.
- Fußpflegestuhl darf nicht in Feuchträumen (z.B.Hydrotherapie) betrieben werden.
- Lassen Sie nicht qualifizierte Personen, insbesondere Kinder, nicht unbeaufsichtigt in der Nähe vom Fußpflegestuhl.
- Sorgen Sie dafür, dass sich während der Behandlung, außer Ihnen und dem Patienten, niemand in der Nähe aufhält, um zu vermeiden, dass sich jemand einklemmt.

### 3 Pflege und Wartung

- Untergestell

Metallteile mit einem weichen trockenen Tuch reinigen. Bei hartnäckigem Schmutz in PH-neutraler Seifenlauge anfeuchten.

- Liegefläche

Zum Reinigen lauwarmes Wasser und ein Mikrofasertuch verwenden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch eine pH-neutrale Seifenlösung verwendet werden. Seifenreste mit einem feuchten Tuch entfernen. Benutzen Sie auf KEINEN FALL Reinigungsmittel, Lösungsmittel (Alkohol), aggressive Seifen und Bleich- oder Scheuermittel: diese Produkte können das Kunstleder angreifen und seine Lebensdauer verkürzen! Verwenden Sie keine Lederpflegemittel, die Öle oder Fette enthalten.

Zur Aufrechterhaltung des Bedienungskomforts und der guten Funktion empfiehlt es sich, der Stuhl einmal jährlich durch geschultes Fachpersonal inspizieren und warten zu lassen.

Sie können selbst einige Vorkehrungen treffen, um die Lebensdauer Ihres Stuhls zu verlängern. Vor Beginn von Wartungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker ziehen!.

- Netzkabel

Kontrollieren Sie das Netzkabel regelmäßig, bei Beschädigung soll es sofort ersetzt werden.

- Achsen/Gelenke

Bitte mindestens halbjährlich und bei Auftreten ungeschmeidiger Bewegung schmieren; dazu – sehr sparsam – handelsübliches Maschinenschmieröl verwenden.

### 4 Technische Daten

Abmessungen Fußpflegestuhl: DP-8298

Höhe: 60-90

Breite mit Armlehnen: 80

Breite ohne Armlehnen: 60cm

Länge: 193-215cm

Polsterung: 10 cm

Bezugstärke: 1,3 mm

Gewicht: 80 kg

Belastbarkeit: 160kg

#### **Entsorgung**

Entsprechend dem Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz sind Altgeräte, die in Deutschland gekauft wurden, direkt an Medeo GmbH zu schicken.

Die Entsorgung durch uns ist kostenlos. Die Geräte dürfen nicht bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben werden