



Bedienungsanleitung



DP-8280 (1 Motor)

Behandlungs- Therapieliege/ Massageliege Bobathliege

Sie finden hier wichtige Hinweise für die Benutzung der Bobathliege DP-8280

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH!

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Informationen

1.a Besondere Merkmale der Behandlungsliege DP-8280

2 Bedienung

- 2.a Nach der Anlieferung
- 2.b Montage/Aufbau
- 2.c Was ist vor der Erstbenutzung zu beachten
- 2.d Einstellungen und Funktionen
- 2.e Allgemeine Sicherheitshinweise

3 Pflege und Wartung

4 Technische Daten

1 Allgemeine Informationen

Vorwort

Mit dem Erwerb Ihrer DP-8280 Behandlungsliege haben Sie für sich und Ihre Kunden ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden.

Die Behandlungsliege hat das Werk in einwandfreiem Zustand und wurde selbstverständlich auf Funktionalität und elektrische Sicherheit überprüft.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf. Sie enthält wichtige Informationen für Betreiber und Anwender über alle Merkmale, die für eine sichere und komfortable Bedienung dieses Gerätes nötig sind.

1.a Besondere Merkmale der Behandlungsliege DP-8280

- **elektrische Höhenverstellung**
- **mechanische Verstellung von Rückenteil**
- **Kopfteil mit Gesichtsausschnitt**
- **Komplette Waagrechtstellung**
- **langlebige Teile und Materialien**
- **pflegefreundlich**
- **entspricht den Anforderungen des MPG MDD 93/42/EWG Klasse 1**

2 Bedienung

2.a Nach der Anlieferung

Die DP-8280 Behandlungsliege wurde bei Ihnen komplett aufgebaut in einem Karton angeliefert. Bitte überprüfen Sie die Kartons äußerlich auf erkennbare Schäden und öffnen Sie diese möglichst vorsichtig, damit Sie nicht aus Versehen die Polsterung beschädigen.

2.b Montage/Aufbau

- Behandlungsliege vorsichtig aus dem Karton heben. Ein Messer könnte den Inhalt beschädigen.
- Wenn sich Kunden auf der Liege befinden muss die Liege immer auf den festen Standfüßen stehen. Das Rollen der Liege kann nur ohne Belastung erfolgen. Der Kunde darf sich beim Rollen nicht auf der Liege befinden.
- Die Liege kann über die Tasten auf dem Bedienungselement elektrisch hoch- bzw. heruntergefahren werden, weiterhin lässt sich das Rückenteil mechanisch positiv verstellen. Unter der Liege finden Sie eine Sicherheitssperre für Elektromotor zur Unterbrechung der Stromzufuhr. Über diese Sperre wird die Liege zusätzlich abgesichert. Nach jeder Behandlung muss durch Drehen des Schlüssels, vom Fachpersonal die Stromzufuhr unterbrochen werden, so dass Kinder oder andere Personen die Behandlungsliege nicht betätigen können. Sicherheits-Sperrbox erfüllt alle Bestimmungen des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) nach Anhang I Nummer 2. der Richtlinie 93/42/EWG

2.c Was ist vor der Erstbenutzung zu beachten

- Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von der Liege, achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Polster beschädigen.
- Bitte alle Schrauben vor Inbetriebnahme prüfen und nachziehen.
- Funktionieren alle Verstell-Funktionen einwandfrei?
 1. elektrische Höhenverstellung
 2. mechanische Rückenteilverstellung
 3. Rollenhebevorrichtung

2.d Einstellungen und Funktionen

Die Höhenverstellung erfolgt mittels Fernbedienung.

Die Behandlungsliege kann über die 2 Tasten (Abb.1) auf dem Bedienelement elektrisch hoch bzw. heruntergefahren werden.

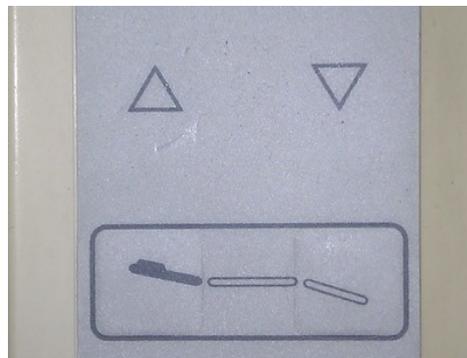


Abb.1

Bei Herunterdrücken der linken Taste (Pfeil nach oben) fährt die Liege nach oben, bei Herunterdrücken der rechten Taste (Pfeil nach unten) fährt die Liege nach unten. Die Liege bewegt sich nur solange Druck auf die Taster ausgeübt wird

Die Behandlungsliege verfügt über eine Rollenhebevorrichtung zum Verschieben der Liege. Zu diesem Zweck Fußhebel (Abb.2) bis zum Anschlag nach unten drücken (bleibt automatisch in der Endposition). Die Liege hebt sich hierbei von Ihren festen Standfüßen und kann nun bewegt werden. Nach dem Verschieben, Rollen mittels Fußhebel unbedingt wieder einfahren.

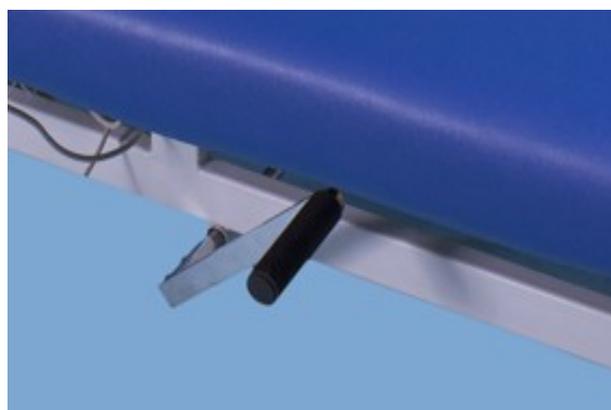


Abb.2

Die Verstellung vom Rückenteil der Behandlungsliege erfolgt über Arretierstangen (siehe Abb.3). Bei der Verstellung darf der Patient keinen Druck auf das Rückenteil ausüben.



Abb.3

Das Rückenteil besitzt über einen Gesichtsausschnitt. Wenn Sie Ihren Kunden auf den Bauch legen lassen, kann der Kunde die Gesichtspartie in dem Gesichtsausschnitt lagern, das sorgt für eine entspannte Körperhaltung.



Abb.4

2.e Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das maximale Hubvermögen (130kg) darf nicht überschritten werden.
- Falls Flüssigkeit auf oder in das Motorgehäuse gelangt, sofort Netzstecker ziehen! Die Liege muss dann durch eine befugte Person oder Institution kontrolliert werden.
- Bitte das Netzkabel so legen, dass es nicht zwischen beweglichen Teilen der Liege eingeklemmt werden und niemand darüber stolpern kann.
- Behandlungsliege darf nicht in Feuchträumen (z.B.Hydrotherapie) betrieben werden.
- Lassen Sie nicht qualifizierte Personen, insbesondere Kinder, nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Behandlungsliege.
- Sorgen Sie dafür, dass sich während der Behandlung, außer Ihnen und dem Patienten, niemand in der Nähe aufhält, um zu vermeiden, dass sich jemand einklemmt.

3 Pflege und Wartung

- Untergestell

Metallteile mit einem weichen trockenen Tuch reinigen. Bei hartnäckigem Schmutz in PH-neutraler Seifenlauge anfeuchten.

- Liegefläche

Zum Reinigen lauwarmes Wasser und ein Mikrofaser Tuch verwenden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch eine pH-neutrale Seifenlösung verwendet werden. Seifenreste mit einem feuchten Tuch entfernen. Benutzen Sie auf KEINEN FALL Reinigungsmittel, Lösungsmittel (Alkohol), aggressive Seifen und Bleich- oder Scheuermittel: diese Produkte können das Kunstleder angreifen und seine Lebensdauer verkürzen! Verwenden Sie keine Lederpflegemittel, die Öle oder Fette enthalten.

Zur Aufrechterhaltung des Bedienungskomforts und der guten Funktion empfiehlt es sich, Ihre Liege einmal jährlich durch geschultes Fachpersonal inspizieren und warten zu lassen.

Sie können selbst einige Vorkehrungen treffen, um die Lebensdauer Ihrer Liege zu verlängern. Vor Beginn von Wartungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker ziehen!.

- Netzkabel

Kontrollieren Sie das Netzkabel regelmäßig, bei Beschädigung soll es sofort ersetzt werden.

- Achsen/Gelenke

Bitte mindestens halbjährlich und bei Auftreten ungeschmeidiger Bewegung schmieren; dazu – sehr sparsam – handelsübliches Maschinenschmieröl verwenden.

4 Technische Daten

Bobath Behandlungsliege: DP-8280

Leistungsaufnahme: 55 Watt

Netz: 220V / 50 Hz

Absicherung: 2A

Klasse A Typ B

L/B/H - 202 cm / 102 cm / 56 bis 100 cm

Polsterung: 5 cm

Bezugstärke: 1,3 mm

Gewicht: 70 kg

Belastbarkeit: 180kg

Kennzeichnung: CE / Typenschild

Entsorgung

Entsprechend dem Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz sind Altgeräte, die in Deutschland gekauft wurden, direkt an den Hersteller (Medeo GmbH) zu schicken.

Die Entsorgung durch uns ist kostenlos. Die Geräte dürfen nicht bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben werden

Medeo GmbH

Alexander-Bell-Str. 14

53332 Bornheim